

Instructions for use



Sanquin Reagents B.V.
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam
The Netherlands

Phone: +31 20 5123599
Fax: +31 20 5123570
Reagents@sanquin.nl
www.sanquin.org/reagents

Cellbind-Incubator

REF K7314

IVD CE

090_v01 09/2019 (de)

Nur für den professionellen
Gebrauch

Kurzanleitung für den Cellbind-Inkubator

Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß und in einem tadellosen technischen Zustand von qualifiziertem Personal sowie unter strenger Beachtung der geltenden Normen für Sicherheit und Unfallverhütung verwendet werden. Für ausführliche Anweisungen siehe bitte die Benutzeranleitung für den Allsheng K37-24 und die Gebrauchsanweisung für die nachstehend aufgeführten Produkte.

Allgemeine Informationen

Der Cellbind-Inkubator wird zur Inkubation von Cellbind-Mikrosäulenkarten verwendet. Wenn das System in Gebrauch ist, muss mindestens einmal täglich eine Kontrolle mit PeliControl (REF K1379) durchgeführt werden. Kommt es bei den Qualitätskontrolltests zu einem Versagen, muss der Grund des Versagens identifiziert werden. Die Labortests dürfen erst dann als zuverlässig betrachtet werden, wenn das Problem behoben wurde.

Vorsichtsmaßnahmen

Siehe die Gebrauchsanweisungen für die oben genannten Produkte.
Die unsachgemäße Verwendung und Handhabung kann zu Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter sowie zu Beeinträchtigungen an der Maschine oder anderen Sachwerten führen. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für die genannten Zwecke und nur, wenn es sich in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand befindet.

Reagenzien

In Kombination mit dem Cellbind-Inkubator können die folgenden Mikrosäulenkarten verwendet werden:

Cellbind Screen	REF K7000	CE
Cellbind Direct	REF K7011	CE
Cellbind Direct Type	REF K7012	CE

Betriebsanleitung

- Netzstrom**
Schalten Sie mit dem Hauptschalter das Gerät ein.
Der Inkubator ist betriebsbereit, wenn das Display sichtbar wird.
- Bedienelemente**
- Timer-Zeit einstellen**
Zum Einstellen der Timer-Zeit von 1 Sekunde bis 99 Minuten 59 Sekunden drücken Sie auf „▲“ oder „▼“.
Wenn Sie auf „▲“ oder „▼“ drücken, beginnt die Ziffer für die Einheit zu blinken und Sie können die Zeit ändern. Nach 6 Sekunden hört das Blinken auf und das Gerät verlässt den Einstellmodus.
- Temperatur einstellen**
Die Standardtemperatur beträgt 37,0 °C.
- Starten und Anhalten**
Das Instrument beginnt automatisch mit der Aufheizung auf die Einstelltemperatur. Mit der linken „START/STOP“-Taste steuern Sie den linken Block, mit der rechten „START/STOP“-Taste den rechten Block.
- Sobald die Temperatur eines Blocks 37,0 °C erreicht hat, stecken Sie die Cellbind-Karte(n) in den Block. Anschließend



Betriebsanleitung

schließen Sie den Deckel und drücken auf die „START/STOP“-Taste, um den Timer für diesen Block zu aktivieren.

- 7 Wenn der Timer 0 erreicht, ertönt ein akustisches Signal und auf dem Display erscheint die Anzeige „OVER“. Drücken Sie eine beliebige Taste, um zurückzukehren oder drücken Sie auf die „START/STOP“-Taste, um den Timer erneut zu starten.
- 8 Drücken Sie die „START/STOP“-Taste 1 Sekunde lang, um den Timer anzuhalten.

Interpretation

Siehe die Gebrauchsanweisungen für die oben genannten Produkte.

Einschränkungen

Siehe die Gebrauchsanweisungen für die oben genannten Produkte.

Sanquin garantiert, dass die Funktionsweise seiner Produkte der Beschreibung in der Originalgebrauchsanweisung des Herstellers entspricht. Die strikte Einhaltung der Verfahren und Testanordnungen sowie die Verwendung der empfohlenen Reagenzien und Gerätschaften ist unerlässlich. Falls der Anwender von diesen Maßgaben abweicht, lehnt Sanquin jegliche Verantwortung ab.