

Instructions for use



Sanquin Reagents B.V.
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam
The Netherlands

Phone: +31 20 5123599
Fax: +31 20 5123570
Reagents@sanquin.nl
www.sanquin.org/reagents

Cellbind incubator

REF K7314

IVD CE

090_v01 09/2019 (hr)

*Samo za profesionalnu
upotrebu*

Referentni priručnik za brzo pokretanje inkubatora Cellbind

Instrument je potrebno upotrebljavati samo za ono za što je namijenjen, u savršenom stanju, od strane kvalificiranih osoba uz strogo pridržavanje trenutanih standarda sigurnosti i sprječavanja ozljeda. Za detaljne upute pogledajte korisnički priručnik Allsheng K37-24 i upute za upotrebu proizvoda navedenih u nastavku.

Opće informacije

Inkubator Cellbind upotrebljava se za inkubiranje mikro kartica stupaca Cellbind. Upotreba PeliControl (REF K1379) potrebna je najmanje jednom dnevno pri upotrebi sustava. U slučaju neuspješnih testova kontrole kvalitete potrebno je identificirati razlog. Laboratorijski testovi ne smatraju se pouzdanima dok se problem ne riješi.

Mjere opreza

Pogledajte upute za upotrebu prethodno navedenih proizvoda.

Neispravna upotreba i rukovanje može rezultirati opasnosti za život i ud korisnika ili treće strane i oštećenjem stroja ili druge materijalne imovine. Stroj treba upotrebljavati samo za određene primjene i samo ako je u savršenom stanju tehničke sigurnosti.

Reagensi

Sljedeće mikro kartice stupaca mogu se upotrebljavati u kombinaciji s inkubatorom Cellbind:

Cellbind Screen

REF K7000 CE

Cellbind Direct

REF K7011 CE


Cellbind Direct Type

REF K7012 CE

Vodič za rad

- Uključivanje**
Uključite glavni prekidač. Inkubator je spreman za rad kada zaslon postane vidljiv.

- Kontrolni elementi**

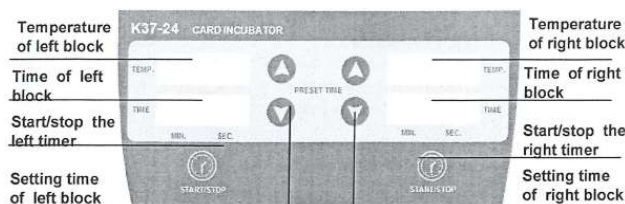

- Postavljanje vremena**

Pritisnite „▲“ ili „▼“ da biste postavili vrijeme od 1 s do 99 min 59 s.

Dok pritisćete „▲“ ili „▼“ znamenka jedinice treperit će i vrijeme se može izmijeniti. Nakon 6 sekundi, treperenje će prestati i izaći će se iz sučelja za postavljanje.



- Postavljanje temperature**

Zadana je postavka 37,0 °C.

- Pokretanje i zaustavljanje**

Instrument će se početi automatski zagrijavati prema postavljenoj temperaturi. Lijeva tipka „POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE“ kontrolira lijevi blok, a desna tipka „POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE“ kontrolira desni blok.

- Kada temperatura bilo kojeg bloka dosegne 37,0 °C, stavite karticu/kartice Cellbind u blok, zatvorite poklopac i pritisnite tipku „POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE“ da biste započeli mjerenje vremena bloka.

Vodič za rad

- 7 Kada mjerac vremena dosegne 0, oglasit će se alarm i na zaslonu će se prikazati „GOTOVO”. Pritisnite bilo koju tipku za povratak ili pritisnite tipku „POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE” za ponovno pokretanje brojača vremena.
- 8 Pritisnite tipku „POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE” 1 sekundu da biste zaustavili brojač vremena.

Interpretacija

Pogledajte upute za upotrebu prethodno navedenih proizvoda.

Ograničenja

Pogledajte upute za upotrebu prethodno navedenih proizvoda.

Proizvodi Sanquin garantirano djeluju kao što je opisano u izvornim uputama za upotrebu proizvođača. Nužno je strogo pridržavanje propisa, rasporeda testova i preporučenih reagensa i opreme. Sanquin se odriče odgovornosti zbog bilo kakvog odstupanja od navedenog.