

Instructions for use



Sanquin Reagents B.V.
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam
The Netherlands

Phone: +31 20 5123599
Fax: +31 20 5123570
Reagents@sanquin.nl
www.sanquin.org/reagents

Cellbind Centrifuge (12 cards)

REF K7312

IVD CE

091_v01 02/2021 (sr)

*Samo za profesionalnu
upotrebu*

Referentni priručnik za brzo pokretanje za Cellbind centrifugu

Instrument treba da se koristi samo u skladu sa namenom, u savršenom tehničkom stanju, od strane kvalifikovanih lica i uz strogo poštovanje važećih standarda bezbednosti i sprečavanja nezgoda. Za detaljna uputstva pogledajte Uputstvo za upotrebu KeCheng i Uputstvo za upotrebu proizvoda navedenih u nastavku.

Opšte informacije

Cellbind centrifuga je preprogramirana za upotrebu Cellbind kartica sa mikrostubovima. Upotreba PeliControl (REF K1379) potrebna je najmanje jednom svakog dana kada se koristi sistem. U slučaju neuspešnih rezultata na testovima kontrole kvaliteta, neophodno je da se utvrdi šta je razlog toga. Laboratorijski testovi ne treba da se smatraju pouzdanim dok se problem ne otkloni.

Mere predostrožnosti

Pogledajte Uputstvo za upotrebu proizvoda navedenih iznad.

Nepravilna upotreba i rukovanje mogu da dovedu do opasnosti po život i udove korisnika ili trećih strana ili oštećenja mašine ili drugih materijalnih resursa. Mašina treba da se koristi samo za navedene primene i samo u besprekorno bezbednom tehničkom stanju.

Reagensi

Sledeće kartice sa mikrostubovima mogu da se koriste u kombinaciji sa Cellbind centrifugom:


Cellbind Screen	REF K7000	CE
Cellbind Direct	REF K7011	CE
Cellbind Direct Type	REF K7012	CE

Radna procedura

1. Otvaranje i zatvaranje poklopca


1.1 Otvaranje poklopca

Pritisnite dugme „STOP / OPEN“ Poklopac se otvara automatski i levo LED svetlo na dugmetu „STOP / OPEN“ se isključuje

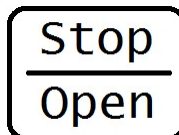

1.2 Zatvaranje poklopca

Zatvorite poklopac nežno pritiskanjem prednje ivice poklopca. Zaključavanje poklopca se obavlja pomoću motora. Levo LED svetlo na dugmetu „STOP / OPEN“ počinje da svetli

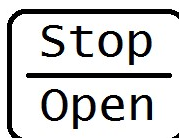

2. Punjenje rotora

2.1 Rotori i posude smeju da se pune samo simetrično.


2.2 Uvek punite gel kartice izvan centrifuge.

2.3 Tečnost ne sme da uđe u komoru centrifuge tokom punjenja i ljuljanja posuda.

2.4 Da bi se održale razlike u težini u okviru centrifugalne posude na minimumu, važno je da se održava dosledan nivo punjenja u posudama.


3. Dugmad (tasteri) kontrolnog panela

3.1 Pregled kontrolnog panela.

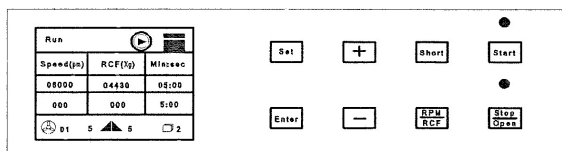

3. Dugmad (tasteri) kontrolnog panela

- 3.2
- Početak procesa centrifugiranja. LED svetlo iznad dugmeta svetli tokom centrifugiranja pod uslovom da se rotor okreće.
- 3.3
- Završetak procesa centrifugiranja. Rotor se automatski usporava u prethodno izabranim koracima kočenja. LED svetlo iznad dugmeta svetli dok se rotor ne zaustavi. Kada se rotor zaustavi, oglašava se zujalica. Pritiskanjem dugmeta tokom centrifugiranja pokreće se HITNO ZAUSTAVLJANJE.
 - Otvorite poklopac. LED svetlo iznad dugmeta se isključuje.
- 3.4
- Prebacujte se između ekrana RPM i RCF. RCF vrednosti se prikazuju znakovima > <.

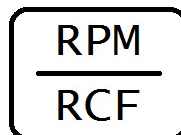

Tumačenje

Pogledajte Uputstvo za upotrebu proizvoda navedenih iznad.

Ograničenja

Pogledajte Uputstvo za upotrebu proizvoda navedenih iznad.

Garantuje se da će Sanquin proizvoditi funkcionisati kao što je opisano u originalnom uputstvu za upotrebu proizvođača. Strogo pridržavanje procedura, rasporeda testiranja i preporučenih reagenasa i opreme od ključnog je značaja. Sanquin odbija svu odgovornost u slučaju nepridržavanja.