

Instructions for use



Sanquin Reagents B.V.
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam
The Netherlands

Phone: +31 20 5123599
Fax: +31 20 5123570
Reagents@sanquin.nl
www.sanquin.org/reagents

Cellbind Centrifuge (12 cards)

REF K7312

IVD CE

091_v01 02/2021 (es)

Para uso exclusivamente profesional

Manual de referencia de inicio rápido para Cellbind Centrifuge

Este instrumento debe utilizarse únicamente para el fin previsto, en condiciones técnicas perfectas, por parte de personal cualificado y bajo una estricta observancia de las normas vigentes de seguridad y prevención de accidentes. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el manual de KeCheng y las instrucciones de uso de los productos que se mencionan a continuación.

Información general

Cellbind Centrifuge está preprogramado para el uso de tarjetas de microcolumnas Cellbind. Cuando se utiliza el sistema, es obligatorio emplear PeliControl (REF K1379) al menos una vez al día. En caso de no superar las pruebas de control de calidad, debe identificarse el motivo. Las pruebas de laboratorio no deben considerarse fiables hasta que se haya resuelto el problema.

Precauciones

Consulte las instrucciones de uso de los productos arriba mencionados.

Un uso y manejo inadecuados pueden entrañar peligros para la vida y las extremidades de los usuarios o de terceras personas, además de problemas de funcionamiento de la máquina o de otros activos materiales. La máquina solo debe usarse para las aplicaciones especificadas y únicamente en unas condiciones impecables de seguridad técnica.

Reactivos

Las siguientes tarjetas de microcolumnas pueden usarse en combinación con Cellbind Centrifuge:

Cellbind Screen	REF K7000	CE
Cellbind Direct	REF K7011	CE
Cellbind Direct Type	REF K7012	CE

Procedimiento operativo

1. Apertura y cierre de la tapa

1.1 Apertura de la tapa

Pulse el botón "STOP / OPEN". La tapa se abrirá automáticamente y el LED izquierdo del botón "STOP / OPEN" se apagará.



1.2 Cierre de la tapa

Cierre la tapa empujando ligeramente su borde frontal. El bloqueo de la tapa se realiza mediante un motor. El LED izquierdo del botón "STOP / OPEN" se encenderá.



2. Carga del rotor

2.1 Los rotores y cubos solo pueden cargarse simétricamente.


2.2 Llene siempre las tarjetas de gel fuera del centrifugador.

2.3 No debe permitir que penetre líquido en la cámara centrífuga durante el llenado y giro de los cubos.

2.4 Para reducir al mínimo las diferencias de peso dentro del contenedor del centrifugador, es importante mantener un nivel de llenado similar en todos los contenedores.

3. Botones del panel de control (teclas)

3.1 Vista general del panel de control.

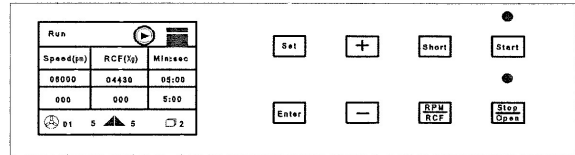

3.2

- Iniciar la sesión de centrifugado. El LED situado sobre el botón permanece encendido durante la sesión de centrifugado mientras el rotor esté girando.




3.3

- Detener la sesión de centrifugado. El rotor se va deteniendo en pasos de frenada preseleccionados. El LED situado sobre el botón permanece encendido hasta que el rotor se detiene. Una vez que el rotor se ha detenido, sonará una señal acústica. Si se pulsa el botón durante el centrifugado, se activa la PARADA DE EMERGENCIA.



- Abrir la tapa. El LED situado sobre el botón se apagará.

3.4 Cambiar entre visualización de RPM y RCF. Los valores de RCF se muestran en > <.

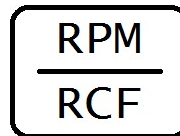

Interpretación

Consulte las instrucciones de uso de los productos arriba mencionados.

Limitaciones

Consulte las instrucciones de uso de los productos arriba mencionados.

Se garantiza que los productos Sanquin funcionarán tal como se describe en las instrucciones de uso del fabricante original. Es esencial seguir estrictamente los procedimientos, los diseños de las pruebas y las recomendaciones en cuanto a reactivos y equipo. Sanquin declina toda responsabilidad derivada de cualquier desviación de estos.